

Bedienungsanleitung

# LADY-COMP® BABY-COMP®



..... die intelligenten Zykluscomputer .....

Kontakt:

LADY-COMP/BABY-COMP  
Kaiserstr. 82 A  
D - 76133 Karlsruhe

Fon: +49 (0) 721-15 18 740  
Fax: +49 (0) 721-15 18 741

Hotline:  
0700 8374838864  
0700 VERHUETUNG

[info@lady-comp.de](mailto:info@lady-comp.de)  
[www.lady-comp.de](http://www.lady-comp.de)

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung, in Zukunft natürlich zu verhüten.

Ob Lady-Comp oder Baby-Comp, ob zuverlässige Verhütung oder Familienplanung, die zum Wunschkind führt – Sie haben so oder so gut gewählt. Das haben Zehntausende von Frauen vor Ihnen auch schon getan. Und alle waren zufrieden mit dieser ebenso sicheren wie natürlichen Methode.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit aufmerksam und vollständig durch. Alles, was Sie über das Gerät wissen sollten, finden Sie im Inhaltsverzeichnis oder im alphabetischen Sachverzeichnis.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start.

## Lady-Comp / Baby-Comp

<b>Lady-Comp/Baby-Comp anschliessen . . .</b>	<b>6</b>
Anschlüsse	
Akku aufladen	
<b>Das Wichtigste zuerst . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>Grundbegriffe . . . . .</b>	<b>8</b>
<b>Selbsttest und Ein-/Abschalten . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>Lady-Comp Bedienebenen . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>Funktionstasten . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>Anzeigenfeld Lady-Comp . . . . .</b>	<b>12</b>
<b>Bevor Sie beginnen . . . . .</b>	<b>13</b>

<b>Messen. . . . .</b>	<b>16</b>
Messzeitraum	
Störungen beim Messen	
Abbruch Messen	
Fieber	
<b>Menstruationseingabe . . . . .</b>	<b>18</b>
„M“ aktivieren	
„M“ korrigieren	
Menstruations-Daten nachträglich eingeben	
<b>Fruchtbarkeitsanzeigen . . . . .</b>	<b>20</b>
Das Gerät lernt Ihren Zyklus kennen	
Schwangerschaftsanzeige Lady-Comp	
Vorausschauende Fruchtbarkeitsanzeige	
Zurückschauende Fruchtbarkeitsanzeige	
<b>Zyklusstatistik Lady-Comp. . . . .</b>	<b>22</b>
Monophasen	
Abfrage Zyklusstatistik	
Datenanalyse und Ausdruck	

<b>Einstellungen . . . . .</b>	<b>24</b>
Uhrzeit einstellen	
Datum einstellen	
Weckton, Wecker ein- und ausschalten	
<b>Weitere Informationen . . . . .</b>	<b>26</b>
Wiederinbetriebnahme nach Nutzungsunterbrechung	
Reisen/Zeitzone	
Schichtarbeit	
Sommer- und Winterzeit	
Nach der Pille	
Keine Messungen vornehmen	
Reinigung Messsensor	
Pearl-Index	
Datenausdruck	
<b>Technische Details . . . . .</b>	<b>28</b>
Löschen gespeicherter Daten	
Helligkeitsregelung	
Netzteil	
Datenverlust ausgeschlossen	
Akku	

## Zusatzfunktionen Baby-Comp

<b>Baby-Comp Bedienebenen . . . . .</b>	<b>30</b>
<b>Anzeigenfeld Baby-Comp . . . . .</b>	<b>31</b>
<b>Die Planungsebene. . . . .</b>	<b>32</b>
Schwangerschaftsplanung	
Geschlechtsprognosen	
„GV“-Eingaben	
Konzeptionsdatum und Geburtstermin	
<b>Schwangerschaft . . . . .</b>	<b>34</b>
Schwangerschaftsanzeige	
Schwangerschaft bestätigt	
Wiederinbetriebnahme nach der Schwangerschaft	
<b>Zyklus- und Planungsstatistik . . . . .</b>	<b>36</b>
Datenanalyse, Ausdruck und Beratungsservice	
<b>Sachwortverzeichnis . . . . .</b>	<b>38</b>

Lady-Comp/Baby-Comp werden mit einem integrierten Akku und einem separaten Netzstecker geliefert (vgl auch Seite 29).

Sie können Lady-Comp/Baby-Comp

- wahlweise am Netz angeschlossen oder
- mit dem integrierten, aufladbaren Akku betreiben (zu Hause und/oder während des Urlaubs).

Wenn Sie das Gerät erhalten, ist der Akku nicht geladen.

- Das erste Mal sollte der Akku ca. 24 Std. geladen werden.
- Beim Wiederaufladen ist der Akku nach ungefähr 12 Std. vollständig aufgeladen.

### Anschlüsse

Auf der Rückseite des Gerätes:

- Stecker des Netzteils in Anschlussbuchse A
- Messensor in Anschlussbuchse B


**Wichtig:** Zuerst den Anschluss A, dann erst den Netzanschluss herstellen.

### Akku aufladen

Bitte die nachfolgende Reihenfolge beachten:

1. Stecker des Netzteils in die Anschlussbuchse A stecken
2. Erst dann den Netzanschluss herstellen
3. Akku laden
4. Netzanschluss lösen
5. Stecker des Netzteils aus Anschlussbuchse A ziehen

- Lady-Comp/Baby-Comp sind nun für ungefähr einen Monat betriebsbereit.
- Wenn die Anzeige BA 9-1 erscheint, muss der Akku erneut aufgeladen werden.

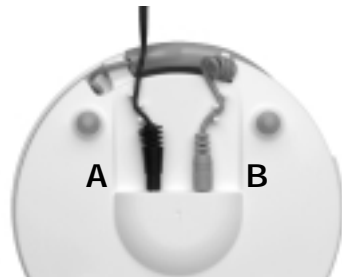

- Sie können gleich morgen früh nach dem Aufwachen mit dem Messen beginnen.
- Messen Sie **immer** die Temperatur unmittelbar nach dem Aufwachen, vor dem Aufstehen, also bevor Sie in irgendeiner Form aktiv werden. (Aufwachttemperatur = Basaltemperatur)
- Wenn Sie Aufzeichnungen über Menstruationsdaten haben, geben sie diese **vor** der ersten Messung ein.
- Für den ersten Tag der Anwendung **muss** der Wecker am Vortag vor 24.00 Uhr gestellt und aktiviert werden.
- Vor dem Beginn, müssen Sie die Pille absetzen. Denn: Das Programm basiert darauf, dass der Eisprung exakt erkannt wird. Die Pille jedoch verhindert den Eisprung.
- Die Spirale, die mit Hormonen dotiert ist, **muss** vor dem Start entfernt werden. Bei einer Kupferspirale ist es empfehlenswert, diese zu entfernen.

Das Programm arbeitet von Anfang an mit eingegebenen Stammdaten. Je regelmässiger Sie messen, um so schneller lernt das Gerät Ihren individuellen Zyklus kennen und deuten. Es zeigt immer mehr grüne (unfruchtbare Tage) an und die roten (fruchtbare Tage) werden enger eingegrenzt.



Bei Inbetriebnahme, sind in Ihrem Lady-Comp/Baby-Comp Beispielwerte gespeichert. Diese werden automatisch gelöscht, sobald Sie eine erste eigene Messung durchgeführt haben. Die Beispielwerte erscheinen wieder, falls Sie Ihre Anwenderdaten jemals löschen.

#### Selbsttest und Probemessung

Lady-Comp/Baby-Comp führt Ihnen in einem Selbsttest alle Anzeigen vor.

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Drücken Sie 3x die Plustaste.
- Lady-Comp/Baby-Comp durchläuft nun selbständig alle Symbole. Das Gerät testet sich selbst und zeigt dies im Anzeigenfenster.
- Am Ende des Testlaufs erscheint die Uhrzeit und das Thermometersymbol leuchtet.
- Wenn Sie die Kreistaste drücken, blinkt das Thermometer und es erfolgt eine Messung.
- Soll keine Probemessung erfolgen, kann diese durch gleichzeitigen Druck auf die Minus- und Plustaste abgebrochen werden.

#### Gerät einschalten


- Drücken Sie eine beliebige Taste.
- Die aktuelle Uhrzeit erscheint.


#### Automatisches Abschalten und automatische Rückkehr in die Uhr-Anzeige


- Wird während 30 Sekunden keine Taste gedrückt, kehrt das Gerät automatisch in die Uhr-Anzeige zurück.
- Beim Drücken zweier Tasten gleichzeitig, kehrt das Gerät automatisch in die Uhr-Anzeige zurück.
- Bei Netzbetrieb geht das Gerät nach 30 Sek. in die eingestellte Dimmstufe zurück.

Bei Akkubetrieb:


- Wenn keine Taste gedrückt wird, stellt sich Lady-Comp/Baby-Comp von selbst nach einer halben Minute ab. Die Anzeige bleibt dann bis zum nächsten Tastendruck oder Klingeln des Weckers dunkel.

**ZEITEBENE**  kurz drücken = einschalten


<b>WECKER</b> ◻  ◻ aus / ein	<b>WECKZEIT</b> ◻ 07:00 ◻ Weckzeit einstellen ◻ 5 Sek. Std. ◻ ◻ kurz Min. ◻ ◻ 5 Sek.	<b>UHRZEIT</b> ◻ 13:46 ◻ Uhrzeit einstellen ◻ 5 Sek. Std. ◻ ◻ kurz Min. ◻ ◻ 5 Sek.	<b>DATUM</b> ◻ → 24.08. ◻ Datum einstellen ◻ 5 Sek. ◻ ◻ 5 Sek.	<b>JAHR</b> ◻ → 2004 ◻
---	---	---	--	---------------------------

**FRUCHTBARKEITSEBENE**  kurz drücken

<b>FRUCHTBARKEIT</b> ◻ ◻ ◻ ◻ 23.08 / 36.63 ◻ ◻ Anzeige bis 180 Tage bzw. 250 Tage zurückschauend ◻ ◻ vor-/zurückblättern	<b>MESSWERT / ZYKLUSTAG</b> ◻ ◻ ◻ ◻ / ◻ ◻ ◻ ◻ 36.65. / .14 ◻ ◻ ja ◻ ◻ M ◻ ◻ nein Eingabe Menstruation ◻ 5 Sek. M ◻	<b>FRUCHTBARKEIT</b> ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ Anzeige bis 6 Tage vorausschauend ◻ ◻ vor-/zurückblättern
--	--	--

**EBENE ZYKLUSSTATISTIK**  kurz drücken

<b>ZYKLUSLÄNGEN</b> ◻ L : 28 ◻ ◻	<b>ANZAHL GEMESSNER ZYKLEN</b> ◻ C : 10 ◻	<b>TEMPERATURANSTIEG</b> ◻ → 17.27 ◻	<b>OV-SCHWANKUNGSBREITE</b> ◻ → 0 - : 02 ◻
-------------------------------------	--	---	---

 kurz drücken / zurück in die Zeitebene

Lady-Comp/Baby-Comp haben verschiedene Bedienebenen:  
Um zwischen den Ebenen zu wählen und für alle Eingaben, betätigen Sie bitte die Funktionstasten.

**Kreistaste** 

- Mit der Kreistaste können Sie die Ebenen wechseln.
- Mit der Kreistaste können Sie die Stellbereitschaft herbeiführen.
- Einstellbereitschaft:  
Kreistaste 5 Sek. drücken und halten
- Die Anzeige blinkt: sie ist stellbereit. Die entsprechenden Daten können mit Plus- oder Minustaste vor- oder zurückgestellt werden.
- Beenden der Einstellung:  
Kreistaste 5 Sek. drücken und halten
- Bestätigung der gewünschten Eingabe:  
Das Blinken endet. Als Bestätigung erfolgt ein akustisches Signal.

**Plustaste** 

- Mit der Plustaste können Sie vorwärts stellen und Eingaben vornehmen (z. B. die Menstruation bestätigen).
- Ein Druck auf die Plustaste stellt die Anzeige jeweils um einen Schritt vorwärts.

**Minustaste** 

- Mit der Minustaste können Sie zurück stellen (z. B. vergangene Messwerte und Auswertungen ansehen).
- Ein Druck auf die Minustaste stellt die Anzeige jeweils um einen Schritt zurück.
- Mit der Minustaste können auch Eingaben korrigiert werden.

**Zurück zur Ausgangsposition**

- Durch Drücken zweier Tasten gleichzeitig, kommen Sie immer zur Ausgangsposition zurück.

**Schnelllauf**

- Mit Drücken und Halten der Plus- bzw. Minustaste stellen Sie schnell zurück oder vorwärts.

- 1 Fruchtbarkeitsanzeigen:  
(von links nach rechts)  
rot = fruchtbar  
gelb = Lern- und Übergangsbereich  
oder fehlende Eingaben  
grün = unfruchtbar
- 2 Wecksymbol:  
Leuchtet, wenn der Wecker eingeschaltet ist.
- 3 Anzeigenfeld:  
für alle Zeitangaben, Messwerte usw.
- 4 Messsymbol:  
Leuchtet im Messzeitraum und  
blinkt bei Messbereitschaft.
- 5 Menstruationsanzeige:  
Blinkt für Eingabe „+“ ja / „-“ nein Menstruation  
und leuchtet konstant wenn „M“ eingegeben  
wurde.



1. Weckzeit einstellen
2. BMI eingeben
3. Evtl. Eingabe zurückliegender  
Menstruations-Daten
4. Wecker aktivieren
5. Messen am nächsten Morgen
6. Fruchtbarkeit ablesen
7. Bei Menstruation „M“ eingeben

Wenn Sie Lady-Comp/Baby-Comp erhalten,  
sind die Uhrzeit, das Datum und das Jahr  
bereits richtig eingestellt.

Bei Reisen in andere Zeitzonen, haben Sie die  
Möglichkeit, Datum und Uhrzeit auf die aktuelle  
Ortszeit umzustellen.

Der Akku im Gerät muss vor der Inbetrieb-  
nahme 24 Stunden geladen werden.  
Sie können das Gerät jedoch schon während  
des Ladevorgangs benutzen, sobald es am  
Netzteil angeschlossen ist.

### 1. Weckzeit einstellen

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Einmal die Minustaste drücken.
- Die eingestellte Weckzeit erscheint.
- Die Kreistaste 5 Sek. gedrückt halten, die  
Weckzeit blinkt.
- Mit der Plustaste die Stunden vorstellen  
oder
- mit der Minustaste die Stunden zurückstellen.
- Wenn die +/- Taste länger als drei Sekunden  
gedrückt wurde, erfolgt der Schnelllauf.
- Anschliessend kurz die Kreistaste drücken,  
nun können sie die Minuten nach dem  
selben Schema verstellen.
- Mit der Plustaste die Weckzeit vorstellen.
- Mit der Minustaste die Weckzeit zurückstellen.
- Einstellen beenden: Druck auf die Kreistaste  
und 5 Sek. halten.
- Das Blinken stoppt, ein akustisches Signal  
ertönt. Die aktuelle Weckzeit wird angezeigt.

## 2. BMI eingeben

BMI = Body Mass Index: Geburtsdatum, Gewicht und Größe. Die Eingabe erleichtert die Zyklusauswertung.

Ausgehend von der Uhrzeit:

- Durch gleichzeitiges Drücken der + / - Taste für 5 Sek. können diese Werte eingegeben werden.
- Zuerst erscheint das Geburtsjahr, es leuchtet das Geburtssymbol.
- Durch Drücken der Plus bzw. Minustaste kann das Geburtsjahr eingegeben werden.
- Einstellen beenden:  
5 Sek. Druck auf die Kreistaste.
- Durch kurzen Druck auf die Kreistaste können sie nun nach dem selben Schema Ihre Größe eingeben, diese wieder mit 5 Sek. Druck bestätigen und anschließend durch nochmaligen kurzen Druck der Kreistaste ihr Gewicht eingeben und mit 5 Sek. Druck bestätigen.
- Zum Speichern der Eingaben, kurzer Druck auf die Kreistaste und Sie kehren zur Uhrzeit zurück.

## 3. Evtl. Eingabe zurückliegender Menstruations-Daten „M“

Wenn Sie Aufzeichnungen über „M“-Daten haben, können Sie diese vor der ersten Messung in das Gerät eingeben. Aktivieren Sie „M“, wie auf Seite 19 beschrieben.

Es muss pro Zyklus nur der erste „M“-Tag eingegeben werden, das Gerät speichert automatisch drei „M“-Tage. Beginnen Sie mit der am weitesten zurückliegenden Menstruations-Eingabe.

## 4. Wecker aktivieren

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Einmal die Minustaste drücken, die Weckzeit erscheint.
- Nochmals die Minustaste drücken, die Glocke blinkt.
- Druck auf die Plustaste = Glocke leuchtet konstant. Sie werden zur gewünschten Zeit geweckt.

## 5. Messen am nächsten Morgen

Messen Sie täglich nach dem Aufwachen Ihre **Basaltemperatur**. Die Basaltemperatur ist die Temperatur unmittelbar nach dem Aufwachen, vor dem Aufstehen, also **bevor** Sie in irgendeiner Form aktiv werden. Alles über das Messen finden Sie auf Seite 17.

## 6. Fruchtbarkeit ablesen

Das Gerät zeigt Ihren Messwert an und Ihre Fruchtbarkeit für den Tag:

rot	fruchtbar
grün	unfruchtbar
gelb	Lern- und Uebergangsbereich
rot blinkt	Prognose Ovulationstag

## 7. Menstruations-Eingaben

Nach dem Messvorgang blinkt gegebenenfalls „M“ = Menstruation.

- Bei „M“ ja drücken Sie die Plustaste, M leuchtet konstant.
- Bei „M“ nein, die Minustaste, M verschwindet aus der Anzeige.
- Mindestens an drei aufeinanderfolgenden Tagen „M“ eingeben.
- Haben Sie „M“ ohne vom Gerät danach gefragt worden zu sein, aktivieren Sie „M“ (vgl. Seite 19).

### Messbereitschaft

Das Gerät ist messbereit:

- +/- 3 Stunden vor bzw. nach dem Klingeln des Weckers.
- +/- 3 Stunden vor bzw. nach dem letzten Messzeitpunkt.



### Messzeitraum

Lady-Comp/Baby-Comp überwacht den Messzeitraum. Er **umfasst 6 Stunden** und beginnt bzw. endet drei Stunden vor und nach dem Messzeitpunkt, sofern dieser vom Weckzeitpunkt abweicht. Gemessen werden kann **nur einmal** am Tag, innerhalb des Messzeitraums. Vor der ersten Messung muss der Wecker aktiviert werden.

Sie erkennen den Messzeitraum am **konstant leuchtenden Messsymbol**. Wenn ein Tag nicht gemessen wurde, wird der Messzeitraum freigegeben und muss wieder neu durch den Wecker gesetzt werden.

In der Regel fallen Weckzeitpunkt und Messzeitpunkt zusammen und wir empfehlen, sich von Lady-Comp/Baby-Comp wecken zu lassen.

Sollten Sie innerhalb des Messzeitraumes aufwachen, z. B. weil Sie Ihr Kind versorgen, messen Sie. Stehen Sie später auf, als der Messzeitraum endet, fällt die Messung aus.

### Messen allgemein

Das tägliche, zuverlässige Messen der Basaltemperatur bildet die wichtigste Grundlage unseres Systems. Die Basaltemperatur ist die Temperatur unmittelbar nach dem Aufwachen, vor dem Aufstehen, also **bevor** Sie in irgendeiner Form aktiv werden.

Je regelmässiger Sie messen, besonders zu Beginn der Anwendung, um so schneller lernt das Gerät Ihren persönlichen Zyklus kennen.

### Tipps zum Messen

Legen Sie den Messsensor unter die Zunge, hinten links oder rechts vom Zungenbändchen und schliessen Sie den Mund. Während der Messung sollte der Sensor nicht verschoben werden. Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie stets die selbe Sensorposition wählen.

### Messen



Lady-Comp/Baby-Comp weckt Sie durch einen Signalton. Durch Druck auf eine beliebige Taste stellen Sie den Weckton aus.



Das Messsymbol leuchtet. Es besteht Messbereitschaft. Den Sensor unter die Zunge legen, ganz hinten rechts oder links vom Zungenbändchen und den Mund schliessen. Um zu messen, drücken Sie eine beliebige Taste.



Das Messsymbol blinkt. Der Messvorgang dauert ca. 60 Sek. Die Anzeige zeigt Messwerte von 34,5 bis 41,0 Grad C an.

Bei Beendigung der Messung ertönt ein Signalton und der festgestellte Messwert erscheint in der Anzeige.

### Störungen beim Messen

Sollten bei der Messung Störungen auftreten, zum Beispiel durch eine Verlagerung des Sensors im Mund, wird die Messung automatisch verlängert. Der Messwert blinkt und weist damit auf eine Störung hin.

### Abbruch Messen

Wenn Sie einmal nicht messen oder den Messvorgang abbrechen wollen, können Sie das Messen abstellen, indem Sie die Minus- und die Plus-taste gleichzeitig drücken. Ein Signalton ertönt. Das Gerät bricht die Messung ab. Die Messung für diesen Tag entfällt.

### Fieber

Wenn der gemessene Wert auf Fieber (höher als 37.80) schliessen lässt, erscheint ein „F“ alternierend mit dem Messwert für Fieber in der Anzeige. Es empfiehlt sich, bei fieberhafter Erkältung oder der Einnahme von Medikamenten die tägliche Messung zu unterbrechen, um den Geräten keine „unnormalen“ Werte einzugeben.

Grundsätzlich geben Sie „M“ an so vielen Tagen ein, wie „M“ dauert, **mindestens** aber an drei Tagen aufeinanderfolgend.

### Menstruationseingaben zu Beginn der Anwendung



Nach dem Messvorgang blinkt gegebenenfalls „M“ = Menstruation.

- Bei „M“ ja, drücken Sie auf die Plustaste. „M“ leuchtet konstant.
- Bei „M“ nein, drücken Sie auf die Minustaste. „M“ verschwindet aus der Anzeige.
- Ein Signal bestätigt die Eingabe, der aktuelle Zyklustag wird alternierend (abwechselnd) mit dem Messwert angezeigt.

### „M“ Eingabe nach einiger Zeit der Anwendung

Wenn Lady-Comp/Baby-Comp Ihren Zyklus etwas kennt, fragt Sie das Gerät nach „M“ nur an den Tagen, wo „M“ erwartet wird.

- Die „M“-Abfrage („M“ blinkt) beginnt 2 Tage vorher.
- Wenn „M“ vorüber ist, hört Lady-Comp/Baby-Comp mit der Abfrage wieder auf.

Die erste Blutung nach Absetzen der Pille ist eine pillenbedingte Entzugsblutung und keine Menstruation. Geben Sie hier noch kein „M“ ein.

### „M“ korrigieren

Falsche „M“-Eingaben können nur für die letzten drei Tage rückwirkend korrigiert werden.

Sollen mehrere „M“-Tage nachgetragen bzw. korrigiert werden, dann immer mit dem am weitesten zurückliegenden Tag beginnen. Vorgehen wie unter „M“ nachträglich eingeben.

### „M“ aktivieren

Haben Sie „M“ an einem Datum, an dem Lady-Comp/Baby-Comp nicht nach „M“ gefragt hat, aktivieren Sie bitte „M“ selbst.

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Drücken Sie die Kreistaste. Es erscheint die Temperatur von heute mit der Fruchtbarkeitsanzeige.
- Die Kreistaste 5 Sek. gedrückt halten. „M“ blinkt.
- Mit Druck auf die Plustaste „M“ eingeben. „M“ leuchtet konstant.

An den kommenden Tagen wird Lady-Comp/Baby-Comp von sich aus nach „M“ fragen.

Bei Korrektur und Nachtrag:  
Die Eingabe ist nur für den ersten „M“-Tag nötig. Das Gerät trägt die beiden folgenden Tage automatisch ein.

### „M“ nachträglich eingeben

Wenn Sie längere Zeit nicht gemessen haben (z. B. im Urlaub), aber während dieser Zeit die Menstruation hatten, können Sie diese rückwirkend eingeben.

Solange keine Messwerte vorliegen, können Sie beliebig weit zurückgehen. Beginnen Sie auch hier mit dem am weitesten zurückliegenden Tag.

Wenn Messwerte vorliegen können Sie an bis zu drei zurückliegenden Tagen „M“ immer korrigieren.

- Sie blättern mit der Minustaste auf das gewünschte Datum zurück.
- Nun die Kreistaste 5 Sek. gedrückt halten. „M“ blinkt.
- Mit Druck auf die Plustaste „M“ eingeben. „M“ leuchtet konstant.
- Bei Korrektur.  
Mit der Minustaste „M“ verneinen.

## Fruchtbarkeitsanzeigen

Lady-Comp/Baby-Comp informiert mit farbigen Anzeigen über die Fruchtbarkeit an jedem Zyklustag.

- **rot** fruchtbar
- **gelb** Lern- und Übergangsbereich, fehlender Messwert, Eisprung überfällig
- **grün** unfruchtbar
- ☀ **rot blinkt** Heute ist der erwartete Eisprung. „rot blinkt“ ist eine Prognose. Für abgeschlossene Zyklen zeigt „rot blinkt“ den ermittelten Eisprung an.

## Das Gerät lernt Ihren Zyklus kennen

Je regelmässiger Sie messen, besonders zu Beginn der Anwendung, um so schneller lernt das Gerät Ihren persönlichen Zyklus kennen.

Die Anzahl „grüner Tage“ nimmt vorsichtig und systematisch zu.

Erhält das Gerät über längere Zeit keine Eingaben mehr oder nur unauswertbare Informationen, nimmt die Anzahl der „gelben Tage“ zu.

## Schwangerschaftsanzeige Lady-Comp

Lady-Comp weist ab dem 15. Tag nach der Empfängnis auf eine wahrscheinliche Schwangerschaft hin, indem rot, gelb und grün gleichzeitig blinken.

Eine Bestätigung der Schwangerschaft erfolgt ab dem 18. Tag nach der Befruchtung, indem rot, gelb und grün konstant aufleuchten (vgl auch Baby-Comp Seite 34).

## Vorausschauende Fruchtbarkeitsanzeige

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Einmal die Kreistaste drücken.
- Einmal die Plustaste drücken und Sie gelangen in die vorausschauende Fruchtbarkeitsanzeige.
- Durch mehrmaligen Druck auf die Plustaste können Sie die zu erwartende Fruchtbarkeit an den kommenden 6 Tagen abrufen.

Welcher Fruchtbarkeitsstatus besteht, wird am betreffenden Tag angezeigt werden. So kann die Prognose für den Tag heute plus 4 z. B. „grün“ sein. Wenn sich der Eisprung aber nach hinten schiebt, also noch Fruchtbarkeit besteht, wird die Anzeige an dem Tag 4 jedoch „rot“ sein.

Die Werte in der Vorschau sind Prognosen. Die Fruchtbarkeit eines „Prognose-Tages“ kann von der am entsprechenden Tag tatsächlich festgestellten Fruchtbarkeit abweichen. Es gilt jeweils die aktuell angezeigte Fruchtbarkeit.

## Zurückschauende Fruchtbarkeitsanzeige

Sie können alle vorangegangenen Messwerte durch mehrmaligen Druck auf die Minustaste bis zu 180 Tage beim Lady-Comp und 250 Tage beim Baby-Comp in die Anzeige rufen.

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Einmal die Kreistaste drücken und der heutige Temperaturwert erscheint, die Anzeige alterniert mit dem aktuellen Zyklustag.
- Einmal die Minustaste drücken. Das Datum vom Vortag wird angezeigt. Diese Anzeige alterniert mit dem Messwert des betreffenden Tages.
- Mit der Minustaste kann man zurückblättern.
- Mit der Plustaste kann man vorwärtsblättern.
- Das Zurückblättern endet, wenn Sie 30 Sek. keine Taste drücken oder wenn Sie die Plus- und die Minustaste gleichzeitig drücken.

### Monophasen

Wenn in einem Zyklus kein Eisprung stattfindet, zeigt Ihnen dies Lady-Comp/Baby-Comp an. In einem solchen Zyklus bleibt das Gerät auf „rot“.

Ein Anteil von bis zu 20% monophasischen Zyklen kann vorkommen. Wenn der Anteil höher ist, erstellen wir einen Zyklusausdruck, den Sie mit einem Gynäkologen besprechen können. Eine Gelbkörper-Unterfunktion (CLI) lässt sich anhand von Lady-Comp/Baby-Comp-Ausdrucken diagnostizieren.

Der Baby-Comp zeigt den Anteil der Monophasen und Zyklen mit einer CLI in der Planungsstatistik an.

Nach Absetzen der Pille dauert es einige Zeit, bis der Eisprung wieder einsetzt und Sie zu Ihrem eigenen Zyklus zurückfinden. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir unterhalten eine Datenbank und tauschen Informationen aus.

### Zyklusstatistik

Das Abfragen dieser Informationen über Ihren individuellen Zyklus ist das Ergebnis unserer über fünfzehn Jahre erarbeiteten Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich der natürlichen Verhütung und Familienplanung, die wir Ihnen gerne zugänglich machen wollen.

### Datenanalyse und Ausdruck

Wenn Sie an einer detaillierten Analyse Ihres Zyklus und an einem Ausdruck der im Gerät gespeicherten Daten interessiert sind, senden Sie Ihren Lady-Comp/Baby-Comp an unsere Adresse ein.

### EBENE ZYKLUSSTATISTIK

ZYKLUSLÄNGEN	ANZAHL GEMESSNER ZYKLEN	TEMPERATURANSTIEG	OV-SCHWANKUNGSBREITE
L : 28 ← ⊖	C : 10	⊕ → Jf . 27	⊕ → 0 - : 02

### Abfrage Zyklusstatistik

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Bei Lady-Comp zweimal die Kreistaste drücken.
- Es wird die Anzahl der gespeicherten Zyklen seit Beginn der Anwendung angezeigt, (Anzeige in absoluten Zahlen) z. B. Symbol C:10.
- Einmal die Minustaste drücken: Ihre Zykluslängen im Durchschnitt, z. B. Symbol L:28.
- Einmal die Plustaste drücken: Ihr Temperaturanstieg nach der Ovulation (Eisprung) im Durchschnitt, z. B. Symbol Jf . 27 = 0,27° Celsius Anstieg.

- Zweimal die Plustaste drücken: Ihre Ovulationsschwankungsbreite (Ovulation = Eisprung) in +/- Tagen, z. B. Symbol 0- : 02.

Sie können die Zyklusstatistik verlassen und zur Uhranzeige zurückkehren, indem Sie die +/- Tasten gleichzeitig drücken.

### Uhrzeit einstellen

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Druck auf die Kreistaste und 5 Sek. gedrückt halten.
- Die Stundenzahl blinkt.
- Mit der Plustaste die Stunden vorstellen.
- Mit der Minustaste die Stunden zurückstellen. Wenn die +/- Tasten länger als drei Sekunden gedrückt werden, erfolgt der Schnelllauf.

Anschliessend kurz die Kreistaste drücken, nun können Sie nach dem selben Verfahren die Minuten verstellen.

- Einstellen beenden: Druck auf die Kreistaste und 5 Sek. halten. Das Blinken hört auf. Sie hören ein akustisches Signal als Bestätigung für Ihre Eingabe.

### Datum einstellen

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Einmal die Plustaste drücken. Es erscheint das Datum.
- Die Kreistaste 5 Sek. gedrückt halten. Das Datum blinkt.
- Mit der Plustaste das Datum vorstellen.
- Mit der Minustaste das Datum zurückstellen.
- Einstellen beenden: Druck auf die Kreistaste und 5 Sek. halten. Ein Signal ertönt, das eingestellte Datum erscheint in der Anzeige.

Das Jahr wird automatisch richtig mitgeführt, wenn Sie das Datum über den 31.12. hinaus verstellen. Das einmal eingestellte Datum wird von Lady-Comp/Baby-Comp mit und ohne Netzanschluss oder leerem Akku auf Dauer richtig mitgeführt, dies gilt auch für Schaltjahre.

Hat das Gerät bereits eine oder mehrere Messungen erhalten, lässt sich das Datum nur noch um einen Tag rückwärts stellen. Wird das Datum zurückgestellt, ist am nächsten Tag keine Messung möglich.

Vorstellen können Sie das Datum immer um einen Tag. Das Datum kann nicht irrtümlich verstellt werden.

So können Sie das Datum beim Reisen in andere Zeitzone korrigieren. Das Messen am Reisetag lassen Sie ausfallen.

### Weckton

Lady-Comp/Baby-Comp weckt anfangs mit leisem Ton, der zunehmend lauter wird. Der Weckvorgang endet, wenn Sie eine beliebige Taste drücken.

### Wecker ein-, ausschalten

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Einmal auf die Minustaste drücken. Die eingestellte Weckzeit erscheint.
- Ein weiterer Druck auf die Minustaste und die Glocke blinkt.
- Drücken Sie auf die Plustaste, wenn Sie geweckt werden wollen.
- Die Glocke leuchtet konstant. Als Bestätigung erfolgt ein akustisches Signal.
- Wollen Sie nicht geweckt werden, müssen Sie beim Blinken der Glocke die Minustaste drücken. Die Glocke erlischt.
- Die Glocke leuchtet zusammen mit der Uhrzeit als Bestätigung dafür, dass Sie am kommenden Morgen geweckt werden.
- Leuchtet die Glocke nicht zusammen mit der Uhrzeit, so wissen Sie, dass Sie nicht geweckt werden. Dies gilt auch für die Folgetage.

### Wiederinbetriebnahme nach Nutzungsunterbrechung

Das Datum, das Jahr und die Uhrzeit laufen auch ohne Netzanschluss und/oder mit leerem Akku automatisch weiter.

Der Messzeitraum wird durch das Nichtmessen freigegeben und muss durch Stellen des Weckers neu gesetzt werden.

Dazu stellen Sie den Wecker für den nächsten Morgen und setzen die Anwendung wie gewohnt fort.

Wollen Sie „M“-Eingaben nachtragen, ist dies immer möglich, solange dazwischen keine Messwerte liegen. Wenn Messwerte vorliegen können irrtümlich eingegebene „M“-Eingaben an bis zu drei zurückliegenden Tagen korrigiert werden.

### Reisen/Zeitzonen

Bei Reisen in andere Zeitzonen, haben Sie die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit auf die aktuelle Ortszeit umzustellen. Am ersten Tag entfällt die Messung (vgl. Seite 24).

### Schichtarbeit

Bei Schichtdienst richtet sich die Weckzeit und damit der Messzeitraum nach der eigentlichen Schlafzeit. Grundsätzlich muss die Basaltemperatur (Aufwachttemperatur) erfasst werden.

### Sommer- und Winterzeit

Sie stellen die Uhrzeit auf Sommer- oder Winterzeit vor bzw. zurück.

### Nach der Pille

Vor dem Beginn müssen Sie die Pille absetzen. Die erste Blutung nach Absetzen der Pille ist eine pillenbedingte Entzugsblutung und keine Menstruation. Geben Sie hier noch kein „M“ ein.

### Keine Messungen vornehmen

Die Geräte errechnen aus den vorhandenen Werten den zukünftigen Zyklusverlauf und daraus die Fruchtbarkeit.

Temperaturerhöhungen durch Erkältung, Grippe, Schlafmangel, übermäßigen Alkoholenuss und/oder Medikamente mit thermischem Effekt sind jedoch „unnormale“ und werden vom Gerät als solche erkannt.

Generell empfiehlt es sich, bei fieberhafter Erkältung, der Einnahme von Medikamenten oder einer durchgefeierten Nacht, die tägliche Messung zu unterbrechen, um den Geräten keine „unnormale“ Werte einzugeben.

### Reinigung Messsensor

Die Sensorspitze kann mit warmem Wasser gereinigt werden. Gelegentliches Reinigen wird empfohlen. Bitte keine chemischen Mittel und keinen Alkohol verwenden.

### Pearl-Index

Beim Pearl-Index handelt es sich um den Wert, mit dem in der Medizin die Sicherheit einer Verhütungsmethode angegeben wird.

Beispiel: Wenn 100 Frauen ein Jahr lang verhüten und eine von ihnen wird schwanger, entspricht das einem Pearl-Index von 1.0.

Die täglichen Fruchtbarkeitsanzeigen von Lady-Comp und Baby-Comp haben einen Pearl-Index von 0.7 oder einfacher ausgedrückt von 99,3%.

### Datenausdruck

Die letzten 180 Tage bei Lady-Comp bzw. die letzten 250 Tage bei Baby-Comp Ihrer gespeicherten Zyklusdaten können beim Hersteller ausgedruckt und analysiert werden.

### Löschen gespeicherter Daten

Gerät in den Selbsttest (siehe Seite 9) bringen, nun können während oder nach dem Selbsttest die Daten gelöscht werden:

- Drücken Sie gleichzeitig die Kreis-, die Minus- und Plustaste.
- Alle drei Tasten 5 Sek. anhaltend drücken.
- In der Anzeige erscheint ein „L“ für Löschen und rechts eine „9“.
- Lassen Sie die drei Tasten nun los.
- Die „9“ müssen Sie durch 9-maligen Druck auf die Minustaste auf Null herunterzählen. Jeder andere Tastendruck bricht den Löschvorgang ab. Bei Null wird automatisch gelöscht. Es ertönt ein Signalton.
- Die aktuelle Uhrzeit erscheint in der Anzeige.

Das unbeabsichtigte Löschen der gespeicherten Daten wird somit ausgeschlossen. Nach dem Löschen finden Sie in den einzelnen Anzeigen die voreingestellten Beispielwerte. Nach der ersten Messung werden die Beispieldaten automatisch gelöscht.

### Helligkeitsregelung

Nur bei Betrieb mit Netzteil:  
Die eingestellte Helligkeit gilt für das „Zeitfenster“ und wird bis zur nächsten Veränderung vom Gerät beibehalten.  
Die anderen Fenster sind immer normal hell. Bei der Bedienung des Gerätes, ist die Anzeige immer normal hell und fällt danach auf die gewünschte Dimmstufe zurück.

Dimmen:

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Die Kreistaste drücken und halten.
- Die Plustaste für „heller“ oder die Minustaste für „dunkler“ drücken.

Es gibt drei verschiedene Helligkeitseinstellungen.

Das Gerät kann durch die Dimmstufe auch ganz abgeschaltet werden, wenn die Minustaste so oft wiederholt gedrückt wird, bis ein Signal ertönt.

### Netzteil

Lady-Comp/Baby-Comp werden mit einem integrierten Akku und einem Euro-Netzteil 110 - 230 V geliefert.

Das Netzteil ist ein Mehrbereichsnetzteil und von 110 - 230 V einsetzbar.

Als Zubehör sind ein Adapter für US; UK; Australien oder ein ROW ( kann dann z.B. als Tischnetzteil verwendet werden) erhältlich.

Die Geräte dürfen nur mit dem Originalnetzteil betrieben werden!

### Datenverlust ausgeschlossen

Bei Netzunterbrechung, und leerem Akku ist ein Verlust der im Lady-Comp/Baby-Comp gespeicherten Daten und Zyklusdaten ausgeschlossen.

### Akku

Sie müssen den integrierten Akku von Lady-Comp/Baby-Comp mit dem Netzteil am Strom angeschlossen für ungefähr 12 Std. aufladen. Lady-Comp/Baby-Comp sind nun für ca. einen Monat netzunabhängig betriebsbereit.

Wiederholen Sie das Aufladen des Akkus, wenn BA 9-1 in der Anzeige erscheint.

Mit den Tasten +/- gleichzeitig kommen sie von der BA-Anzeige zurück zur Uhrzeit.

**Wichtig!** Wenn die Anzeige unter BA 1 fällt ist das Gerät nicht mehr bedienbar, Akku aufladen.

kurz drücken = einschalten

ZEITEBENE

WECKER ⊖ 🔔 ⊕ ← ⊖	WECKZEIT 07:00 ← ⊖	UHRZEIT 13:46	DATUM ⊕ → 24.08.	JAH ⊕ → 2004
---------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-----------------

kurz drücken

FRUCHTBARKEITSEBENE

FRUCHTBARKEIT ••• 23.08 / 36.63 ← ⊖	MESSWERT / ••• 36.65. /	ZYKLUSTAG ••• .14	FRUCHTBARKEIT ••• ⊕ → .01	Einstellung der Zeit- und Fruchtbarkeitsebene entnehmen Sie bitte Seite 10
---	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--

kurz drücken

PLANUNGSEBENE

EMPFÄNGNISTAG *•• 29.01 ← ⊖	DATUM 24.08.	GEBURTSTERMIN ⊕ → 22.10.
GV Eingabe ⊙ 5 Sek. ⊙ ⊕		

kurz drücken

EBENE ZYKLUS- + PLANUNGSSTATISTIK

CLI-WERT L 1: ← ⊖	MONO-PHASEN PO: ← ⊖	HOCHLAGEN-LÄNGE HL: ← ⊖	ZYKLUS-LÄNGEN L: ← ⊖	ANZAHL GEMESSNER ZYKLEN C: 10	TEMPERATUR-ANSTIEG ⊕ → JF. ⊕	OV-SCHWANKUNGSBREITE ⊕ → 0-: ⊕	PLANUNGS-TREFFER → 10:03
----------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

kurz drücken / zurück in die Zeitebene

- 1 Fruchtbarkeitsanzeigen: (von links nach rechts)  
rot = fruchtbar  
gelb = Lern- und Übergangsbereich oder fehlende Eingaben  
grün = unfruchtbar
- 2 Wecksymbol: Leuchtet, wenn der Wecker eingeschaltet ist.
- 3 Anzeigenfeld: für alle Zeitangaben, Messwerte usw.
- 4 Messsymbol: Leuchtet im Messzeitraum und blinkt bei Messbereitschaft.
- 5 Menstruationsanzeige: Blinkt für Eingabe „+“ ja / „-“ nein Menstruation und leuchtet konstant wenn „M“ eingegeben wurde.
- 6 Geburtsanzeige: Datum blinkt am möglichen Geburtstermin. Datum leuchtet konstant bei bestätigter Schwangerschaft.
- 7 Konzeptions-Anzeige: Datum blinkt bei Konzeptionsoptimum und leuchtet konstant bei bestätigter Schwangerschaft.
- 8 Geschlechtsanzeige „girl“: Leuchtet, wenn eher ein Mädchen zu erwarten ist.
- 9 GV-Eingabe: Blinkt für Eingabe Geschlechtsverkehr.
- 10 Geschlechtsanzeige „boy“: Leuchtet, wenn eher ein Knabe zu erwarten ist.





### Schwangerschaftsplanung

Baby-Comp zeigt Ihnen den optimalen Zeitpunkt an, um schwanger zu werden.



Nur zwei Tage pro Zyklus gelten als optimal. Diese haben keine Geschlechtspräferenz, die „boy“ und „girl“-Symbole leuchten zusammen mit dem Datum.



Um eher einen Jungen zu planen, verkehren Sie bitte nur an dem Tag, an dem nur das „boy“-Symbol alleine angezeigt wird.



Bei einer Präferenz für ein Mädchen verkehren Sie bitte nur an dem Tag, an dem das „girl“-Symbol angezeigt wird.

Das „boy“-Symbol leuchtet einen Tag vor dem ersten optimalen Empfängnistag. Das „girl“-Symbol leuchtet einen Tag nach dem zweiten optimalen Empfängnistag.

### Geschlechtsprognosen

Während einer möglichen, bzw. bestätigten Schwangerschaft, zeigt Baby-Comp an, ob eher ein Junge oder ein Mädchen erwartet wird. Voraussetzung dafür ist die GV-Eingabe am nächsten Morgen nach dem Verkehr.



Junge und Mädchen werden zugleich angezeigt, wenn der Verkehr auf einen der Tage fällt, an dem „boy“ und „girl“ gleich wahrscheinlich sind. Dies trifft auch zu, wenn keine GV-Eingaben vorgenommen wurden.

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Drücken Sie zweimal die Kreistaste. In der Anzeige erscheint das heutige Datum.
- Drücken Sie nun auf die Minustaste, so erscheint das Empfängnisdatum mit den Symbolen „boy“ und/oder „girl“, sowie das Spermata-Symbol.
- Drücken Sie anschliessend zweimal auf die Plustaste, so erscheint der errechnete Geburtstag mit den Symbolen „boy“ und/oder „girl“, sowie das Geburts-Symbol.

### „GV“-Eingaben für Geschlechtsprognosen

Wenn Sie eine Schwangerschaft planen und an einer Geschlechtsprognose interessiert sind, dann teilen Sie es Baby-Comp mit, wenn Geschlechtsverkehr (GV) stattgefunden hat. „GV“-Eingaben nehmen Sie am nächsten Morgen **nach** dem Messen vor. „GV“-Eingaben sind nur am selben Tag korrigierbar.

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Drücken Sie zweimal die Kreistaste und Sie befinden sich auf der Planungsebene.
- Halten Sie nun die Kreistaste 5 Sekunden gedrückt. Jetzt blinkt das „GV“-Symbol.
- Nun sagen Sie mit der Plustaste ja für „GV“. Ein akustisches Signal bestätigt die Eingabe.
- Das „GV“-Symbol leuchtet konstant.

Wenn Baby-Comp „GV“-Eingaben erhalten hat, wird er Ihnen an den fruchtbaren Tagen anzeigen, ob im Falle einer Befruchtung eher mit einem Mädchen oder Jungen zu rechnen ist.

### Konzeptionsdatum und Geburtstermin

Nach einem erkannten Eisprung zeigt Baby-Comp in der Planungsebene das mögliche Empfängnis- und Geburtsdatum an.

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Drücken Sie zweimal die Kreistaste. In der Anzeige erscheint das heutige Datum.
- Drücken Sie nun auf die Minustaste, so erscheint das Empfängnisdatum.
- Drücken Sie anschliessend zweimal auf die Plustaste, so erscheint der errechnete Geburtstermin.

Vor dem Eisprung **blinken** die Anzeigen und Symbole. Nach dem Eisprung **leuchten** sie konstant. Wenn keine Aussage möglich ist, erscheint „- - -“ in der Anzeige.

### Schwangerschaftsanzeige

Baby-Comp unterscheidet drei Schwangerschaftsstufen.


**1** Mögliche Schwangerschaft nach 4–5 Tagen rot, gelb und grün leuchten alternierend, sofern GV eingegeben wurde.

**2** Wahrscheinlich schwanger nach 15 Tagen rot, gelb und grün blinken.


**3** Schwangerschaft bestätigt nach 18 Tagen rot, gelb und grün leuchten konstant.

Die Anzeigen der Stufe 2 und 3 erfolgen auch ohne GV-Eingabe.


Auf eine mögliche Schwangerschaft weist Baby-Comp nach dem 4.–5. Tag nach der Befruchtung hin. Diese sehr frühe Anzeige erfolgt, wenn GV (Geschlechtsverkehr) am nächsten Morgen nach der Messung eingegeben wird und eine mögliche Schwangerschaft errechnet werden konnte.

 Die Fruchtbarkeitssymbole rot, gelb und grün alternieren.

Nach dem 15. Tag wird Baby-Comp auf eine „wahrscheinliche Schwangerschaft“ hinweisen.

 Die Fruchtbarkeitssymbole rot, gelb und grün blinken.

Bestätigt sich die wahrscheinliche Schwangerschaft, erfolgt eine weitere Anzeige ab dem 18. Tag nach der Befruchtung.

 Alle drei Farben leuchten konstant.

### Schwangerschaft bestätigt

Wenn eine Schwangerschaft festgestellt wurde, empfehlen wir, das morgendliche Messen in den ersten Monaten fortzusetzen.

Baby-Comp überwacht den Fortbestand der frühen Schwangerschaft.

Bei einer bestätigten Schwangerschaft leuchten das Empfängnisdatum und der Geburtstermin konstant.

Jetzt wird es Zeit, mit Ihrem Gynäkologen einen Termin zu vereinbaren.

### Wiederinbetriebnahme nach der Schwangerschaft

In den ersten sechs Wochen nach der Geburt besteht keine Fruchtbarkeit.

Danach und in allen anderen Fällen empfehlen wir **spätestens ab der sechsten Woche** nach der Geburt wieder zu messen.

Das Gerät wird bis auf Weiteres „gelb“ anzeigen.

Der wiederbeginnende Zyklus kündigt sich mit leichten Temperaturschwankungen an. Baby-Comp nimmt seine Fruchtbarkeitsanzeigen wieder auf.



## Zyklus- und Planungsstatistik

Seit der Einführung des Baby-Comp im Jahre 1986 haben wir unzählige Paare, mit dem Ausdruck, der Analyse der gespeicherten Daten und dem von uns entwickelten Auswertungsprogramm bei der Planung eines Kindes unterstützt.

Mit der Zyklus- und Planungsstatistik, haben Sie die Möglichkeit bei Ihnen zu Hause, auf Tastendruck zu Informationen für die Planung eines Kindes zu kommen.

Ausgehend von der Uhranzeige:

- Drücken Sie dreimal auf die Kreistaste. Sie befinden sich nun auf der Ebene 4, der Zyklus- und Planungsstatistik.
- Es wird die Anzahl der gespeicherten Zyklen seit Beginn der Anwendung angezeigt, z. B. C 10 (Anzeige in absoluten Zahlen).

### EBENE ZYKLUS- UND PLANUNGSSTATISTIK

GELBKÖRPER- UNTERFUNKTION	MONO- PHASEN	HOCHLAGEN- LÄNGE	ZYKLUS- LÄNGEN	ANZAHL GEMESSNER ZYKLEN	TEMPERATUR- ANSTIEG	OV-SCHWAN- KUNGSBREITE	PLANUNGS- TREFFER
L 1: -- ← ⊖	PO: -- ← ⊖	HL: -- ← ⊖	L: 28 ← ⊖	C: 10	⊕ → Jf .27 ⊕ →	⊕ → 0 -: 02 ⊕ →	⊕ → 10:03 ⊕ →

#### Minustasten drücken

- Einmal drücken: Ihre Zykluslängen im Durchschnitt, z. B. Symbol L: 28.
- Zweimal drücken: Ihre Hochlagenlänge im Durchschnitt Symbol HL: --.
- Dreimal drücken: Ihre Monophasen in % der letzten 20 Zyklen, Symbol PO: --.
- Viermal drücken: erscheint die CLI in %, Symbol LI: -- (CLI = Gelbkörperunterfunktion).

#### Plustasten drücken

- Einmal drücken: Ihr Temperaturanstieg nach der Ovulation im Durchschnitt, z. B. Symbol Jf .27, 0,27° Celsius Temperaturanstieg.
- Zweimal drücken: Ihre Ovulationsschwankungsbreite (Ovulation = Eisprung) in +/- Tagen, z. B. Symbol 0 -: 02.
- Dreimal drücken: Ihre Planungstreffer: links die Anzahl Zyklen, rechts die Anzahl der Treffer, begrenzt auf die letzten 20 Zyklen, z.B. Symbol ⊕ 10:03.

Sie können die Zyklus- und Planungsstatistik verlassen und zur Uhranzeige zurückkehren, indem Sie +/- Tasten gleichzeitig drücken.

#### Datenanalyse, Ausdruck und Beratungsservice

Wenn Sie an einer detaillierten Analyse Ihres Zyklus und an einem Ausdruck der im Gerät gespeicherten Daten interessiert sind, senden Sie Ihren Lady-Comp/Baby-Comp an unsere Adresse ein.

Bei Zyklus- und Empfängnischwierigkeiten liefert für Sie und auch für Ihren Gynäkologen ein Ausdruck und eine Auswertung der gespeicherten Daten in der Regel wertvolle Hinweise.

Akku aufladen . . . . .	6 + 29	Geschlechtsprognosen . . . . .	32
Anschlüsse . . . . .	6	Grundbegriffe für alle Eingaben . . . . .	8
Anzeigefeld Lady-Comp . . . . .	12	„GV“-Eingaben für Geschlechtsprognosen . . . . .	33
Anzeigefeld Baby-Comp . . . . .	31	Helligkeitsregelung . . . . .	28
Automatisches Abschalten und Rückkehr in die Uhranzeige . . . . .	9	Keine Messungen vornehmen . . . . .	27
Bedienebenen Lady-Comp . . . . .	10	Konzeptionsdatum und Geburtstermin . . . . .	33
Bedienebenen Baby-Comp . . . . .	10 + 30	Löschen der gespeicherten Daten . . . . .	28
Bevor Sie beginnen . . . . .	13	Menstruationseingaben zu Beginn . . . . .	15 + 18
Body Mass Index BMI . . . . .	14	Menstruationseingaben nach einiger Zeit . . . . .	18
Datenanalyse und Ausdruck . . . . .	22 + 37	„M“ korrigieren . . . . .	19
Datenausdruck . . . . .	27	„M“ aktivieren . . . . .	19
Datum einstellen . . . . .	24	„M“ nachträglich eingeben . . . . .	19
Datenverlust ausgeschlossen . . . . .	29	Messen allgemein . . . . .	16
Eisprung-Anzeige . . . . .	20	Messen . . . . .	17
Empfängnisdatum und Geburtstermin . . . . .	33	Messen, Tipps . . . . .	16
Fruchtbarkeitsanzeigen . . . . .	20	Messzeitraum . . . . .	16
Funktionstasten . . . . .	11	Monophasen . . . . .	22
Geburtstermin und Konzeptionsdatum . . . . .	33	Netzteil . . . . .	29
		Notwendige Einstellungen vor Beginn . . . . .	13

Pearl-Index . . . . .	27	Weckzeit einstellen . . . . .	13
Pille und Lady-Comp/Baby-Comp . . . . .	7 + 26	Wiederinbetriebnahme nach Nutzungsunterbrechung . . . . .	26
Planungsstatistik . . . . .	36	Wiederinbetriebnahme nach der Schwangerschaft . . . . .	35
Probemessung . . . . .	9	Zurückschauende Fruchtbarkeitsanzeige . . . . .	21
Reinigung Messsensor . . . . .	27	Zyklusstatistik . . . . .	22
Reisen/Zeitzone . . . . .	26	Zyklus- und Planungsstatistik . . . . .	36
Selbsttest und Probemessung . . . . .	9		
Schichtarbeit . . . . .	26		
Schwangerschaftsanzeige Lady-Comp . . . . .	20		
Schwangerschaftsanzeige Baby-Comp . . . . .	34		
Schwangerschaft bestätigt . . . . .	35		
Schwangerschaftsplanung . . . . .	32		
Sommer- und Winterzeit . . . . .	26		
Spirale und Lady-Comp/Baby-Comp . . . . .	7		
Uhrzeit einstellen . . . . .	24		
Vorausschauende Fruchtbarkeitsanzeige . . . . .	21		
Wecker ein-, ausschalten . . . . .	25		